

הוראות שימוש במשדר מסוג:

Roger Clip-On Mic 1.1



תוכן העניינים

1. הקדמה
2. תיאור ה Roger Clip-On Mic
 - 2.1 בקופסא
 - 2.2 כיצד עובד ה Roger Clip-On Mic
 - 2.3 תיאור המשדר
 - 2.4 נוריות החיווי (LED)
3. הנחיות לשימוש במשדר שלב אחר שלב
 - 3.1 חיבור בסיס ההטענה
 - 3.2 הטענת ה Roger Clip-On Mic
 - 3.3 כיבוי והדלקה של ה Roger Clip-On Mic
 - 3.4 השימוש במקלטי Roger
 - 3.5 חיבור המקלט
4. שימוש ב Roger Clip-On Mic
 - 4.1 נשיאה של ה Roger Clip-On Mic
 - 4.2 השימוש בלולאת-הצוואר
 - 4.3 התחברות למכשירי מולטימדיה
5. פונקציות מיוחדות

- 5.1 השתקה
- 5.2 ניתוק של משדרי ה Roger (NewNet).
- 5.3 מצב אימות
- 6. הוספת משדרים
- 6.1 חיבור
- 6.2 השימוש במשדרים נוספים
- 7. פתרון בעיות
- 8. מידע חשוב
- 9. שירות ואחריות

1. הקדמה

תודה על שבחרתם ב Roger Clip-On Mic של חברת פונאק. זהו למעשה מעין משדר קומפקטי, אשר מעביר תשדורת אלחוטית בעלת יכולת התאמה עצמית לסביבה. השימוש בו בשילוב עם מקלט תואם של פונאק, יאפשר לכם להבין טוב יותר דיבור על רקע רעש ומרחק.

משדר זה הינו אידיאלי לשימוש על ידי שותף או חבר. בנוסף לכך, הוא מאפשר גם שמיעה ישירה של הטלוויזיה וכן חיבור של כבל אודיו למקורות מולטימדיה שונים. ניתן אף להשתמש בו לצד משדרים אחרים מסוג Roger Pen I Clip-On-Mic תחת רשת משדרים אחת. Roger Clip-On Mic הינו מוצר שפותח על ידי החברה השוויצרית פונאק, המובילה בעולם בטכנולוגיית FM ומכשירי שמיעה. אנא קראו מדריך זה בעיון על מנת שתוכלו להפיק את המיטב ממשדר ה Roger Clip-On Mic.

במידה ועולות שאלות, ניתן להתייעץ עם קלינאי התקשורת במכון השמיעה בו אתם מטופלים. על מנת לקבל פרטים נוספים אודות משדר ה Roger Clip-On Mic של פונאק, ניתן לבקר באתר www.Phonak.com

2. תיאור ה Roger Clip-On Mic

2.1. בקופסא



Roger Clip-On Mic



בסיס הטענה



ספק-כוח עם מתאם
וכבל להטענה



נרתיק אחסון



לולאה

★
מדבקה בצורת כוכב



כבל אודיו עבור
בסיס ההטענה



כבל אודיו מסוג
micro-USB
(מתאים לניסיעות)




מתאם RCA/Cinch
עבור טלוויזיה או HiFi



מדריך שימוש מקוצר

2.2. כיצד עובד ה Roger Clip-On Mic


Roger Clip-On Mic משדר את קולו של הדובר ישירות אל המקלט. המערכת כוללת שלושה מרכיבים עיקריים: מכשירי השמיעה, מקלטי Roger Clip-On Mic.

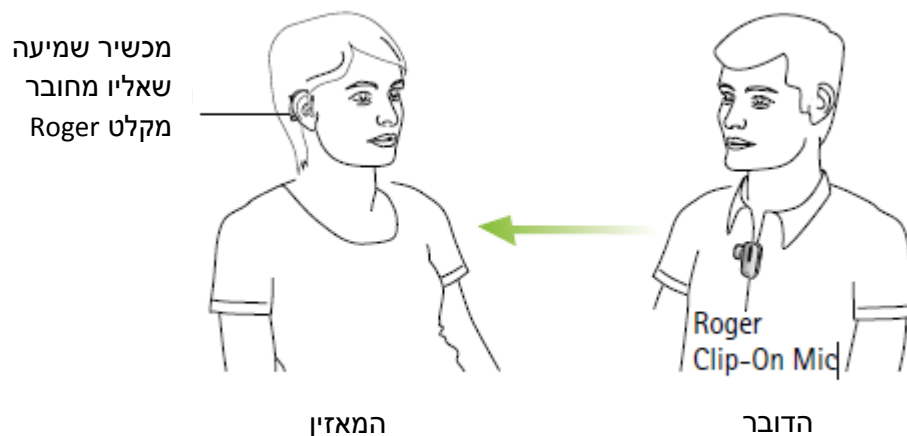

ה Roger Clip-On Mic והמקלטים אשר מחוברים למכשירי השמיעה מתקשרים בדרך כלל בטווח של עד 10 מטרים. שימו לב שאנשים וקירות אשר עומדים בדרכה של התשדורת עשויים להפחית מרחק זה. הטווח הגדול ביותר מתאפשר כאשר ה Roger Clip-On Mic נמצא בטווח הראייה שלכם.


2.3. תיאור המשדר

Roger Clip-On Mic

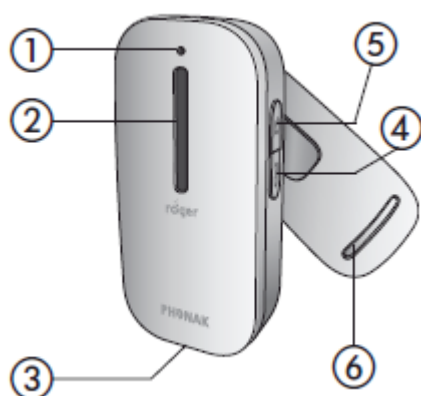

- ① נורית חיווי (LED)
- ② מיקרופונים
- ③ חיבור טעינה וחיבור לכבל שמע (micro-USB)
- ④ התחברות
- ⑤ הדלקה/כיבוי/השתקה
- ⑥ קליפס מסתובב

בסיס הטענה

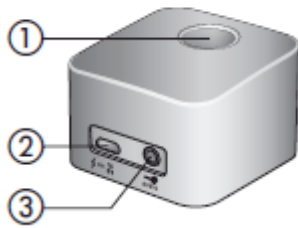

- ① חריץ עבור Roger Clip-On Mic
- ② פתח הטענה (micro-USB)
- ③ חיבור לכבל אודיו (3.5 מ"מ)

2.4. נוריות החיווי (LED)

נורית החיווי	משמעות
● ● ●	הדלקה
▲	כיבוי
●	זוהה התקן שמע
■	המיקרופון/התקן השמע הושתקו
■	בטעינה
■	טעון במלואו
● ● ● ● ● ● ● ●	סוללה חלשה- הטעינו את ה-Roger Clip-On-mic
● ● ●	משדר ה-Roger איננו מצליח לזהות את המשדר הראשי. הדליקו את משדר ה-Roger הראשי וודאו שהוא נמצא בטווח הקליטה של משדר ה-Roger.

לחילופין, במידה ואינכם מעוניינים להשתמש ב-Roger Clip-On-Mic תחת רשת משדרים, לחצו לחיצה ארוכה של 7 שניות על לחצן ההתחברות עד שנורית ה-LED משנה את צבעה לכתום. לאחר מכן, עליכם לחבר מחדש את ה-Roger Clip-On-Mic למקלט/י ה-Roger שלכם.

3. הנחיות לשימוש במשדר שלב אחר שלב

3.1 חיבור בסיס ההטענה


בסיס ההטענה של Roger Clip-On Mic משמש הן להטענת המשדר והן לשידור שמע אל ה Roger Clip-On Mic (ואל מכשירי השמיעה) מהטלוויזיה או מכל מקור שמע אחר.

הכנתו של ספק הכוח


1. בחרו את המתאם למדינה בה אתם נמצאים בהתאם לאזור הבא:



2. הכניסו את החלק העליון והמעוגל של המתאם אל תוך החלק העליון של ספק הכוח האוניברסאלי.
3. חברו את בסיס המתאם בקליק על מנת לנעול אותו במקום המתאים.

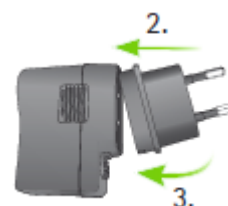



הסרה/החלפה:

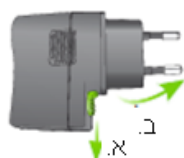

א. משכו לאחור את הלשונית של ספק הכוח האוניברסאלי.
ב. משכו בעדינות את המתאם כלפי מעלה על מנת להסירו.
ג. התחילו מחדש משלב 1.


חיבור של ספק הכוח אל בסיס ההטענה

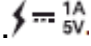1. הניחו את בסיס ההטענה לצד הטלוויזיה או מקור השמע. חברו את הקצה הקטן יותר של כבל ההטענה לפתח חיבור החשמל של בסיס ההטענה. . ההטענה.
2. חברו את הקצה הגדול יותר של כבל ההטענה לתוך ספק הכוח האוניברסאלי.
3. חברו את ספק הכוח לתוך שקע החשמל הנגיש ביותר.

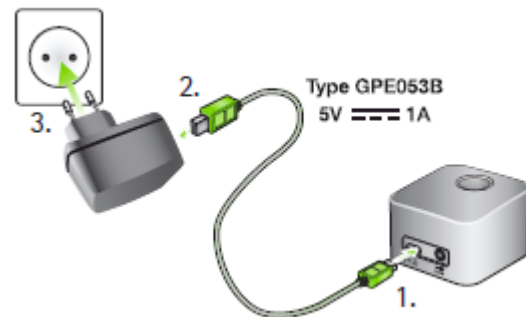

חיבור של בסיס ההטענה אל הטלוויזיה או אל מקור שמע אחר



1. חברו את כבל השמע אל תוך פתח יציאת השמע של בסיס ההטענה. .
2. חברו את הקצה השני של כבל השמע אל תוך פתח יציאת האוזניות בטלוויזיה או במקור השמע האחר שבו אתם משתמשים.



לחילופין, ניתן לחבר את הקצה השני של כבל השמע אל מתאם ה-Cinch/RCA של הטלוויזיה. חברו את התקע האדום ואת התקע הלבן אל תוך השקע האדום והשקע הלבן בהתאמה בתוך הטלוויזיה.



ניתן גם לחבר באמצעות מתאם SCART אשר ניתן לרכוש בחנות אלקטרוניקה. חברו את הקצה השני של כבל השמע למתאם ה-SCART. לאחר מכן חברו את מתאם ה-SCART לתוך שקע SCART חופשי בתוך הטלוויזיה.

במידה ואין בטלוויזיה שלכם שקע שמע אנלוגי, יהיה עליכם להשתמש בממיר מדיגיטלי לאנלוגי. ניתן לרכוש ממירים מסוג זה בחנויות אלקטרוניקה.

① כאשר בסיס ההטענה מחובר אל שקע האוזניות של הטלוויזיה שלכם, ניתן לכוון את העוצמה באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

① ישנן טלוויזיות אשר יכבו את הרמקולים שלכן כאשר תחברו את הכבל אל תוך שקע האוזניות- כלומר, אנשים אחרים לא ישמעו את הטלוויזיה. במקרים כאלה, השתמשו בשקע ה- Cinch/RCA או ה- SCART כפי שתואר בעמודים הקודמים.

① ניתן לחבר את בסיס ההטענה של ה- Roger Clip-On Mic באמצעות כבל שמע גם למכשירי שמע אחרים כדוגמת נגן MP3, מחשב או מערכת HiFi.

3.2 הטענת ה- Roger Clip-On Mic



Roger Clip-On Mic כולל סוללת ליתיום-פולימר מובנית ונטענת.

על מנת להטעין את ה- Roger Clip-On Mic, הכניסו אותו אל תוך החרוץ של תחנת הטעינה. בעת הטעינה, נורית החיווי תשנה את צבעה לכתום.


סוללה חלשה תגיע לטעינה מלאה בתוך שעתיים לערך. תדעו שהטעינה הושלמה ברגע שנורית החיווי תשנה את צבעה לירוק שאינו-מהבהב.

① בעת הטעינה הראשונה של ה- Roger Clip-On Mic, יש לטעון למשך שעתיים לפחות. אין להטעין פחות מכך, גם אם נורית החיווי של הסוללה איננה דלוקה וגם אם היא משנה את צבעה לירוק תוך זמן קצר יותר.

לחילופין, ניתן גם להטעין את ה Roger Clip-On Mic ללא בסיס ההטענה. שיטה זו עשויה להועיל לכם בעת טיולים ונסיעות.

השימוש בכבל ה micro-USB:

1. חברו את הקצה הקטן יותר (micro-USB) של כבל ההטענה לתוך ה Roger Clip-On Mic.
2. חברו את הקצה הגדול יותר (USB) של כבל ההטענה לתוך ספק הכוח.
3. חברו את ספק הכוח לתוך שקע חשמל נגיש.

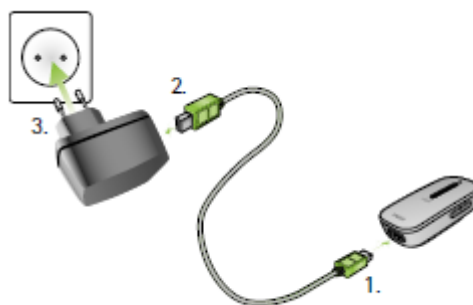

- ① ניתן גם להטעין את ה Roger Clip-On Mic באמצעות חיבורו של כבל הטעינה לאחת מכניסות ה USB שבמחשב שלכם.
- ① במידה ותחברו את כבל הטעינה לפתח ה USB של המחשב שלכם ולבסיס ההטענה בו-זמנית לא תתאפשר טעינה של ה Roger Clip-On.

נוריות החיווי (מצב הסוללה)

משמעות	נורית החיווי
בטעינה	
טעון במלואו	
סוללה חלשה- הטעינו את ה Roger Clip-On Mic. בנוסף, תשמעו צפצופים בתוך מכשירי השמיעה.	

3.3. כיבוי והדלקה

על מנת להדליק את ה Roger Clip-On Mic, לחצו על לחצן ה on/off למשך שניה אחת עד שנורית החיווי תשנה את צבעה לירוק.



נורית החיווי (הדלקה)

נורית החיווי	משמעות
	בתהליך הדלקה
	דלוק

3.4. השימוש במקלטי Roger

השימוש ב Roger MyLink



במידה ואתם משתמשים במקלט מסוג Roger MyLink, הדליקו אותו ותלו אותו סביב צווארכם ודאו שמכשירי השמיעה מכוונים לתוכנית T/MT/T-Coil.

בחוברת ההוראות של Roger MyLink מוסבר כיצד להשתמש במקלט זה.

השימוש במקלטי Roger אשר מתחברים ישירות למכשירי השמיעה




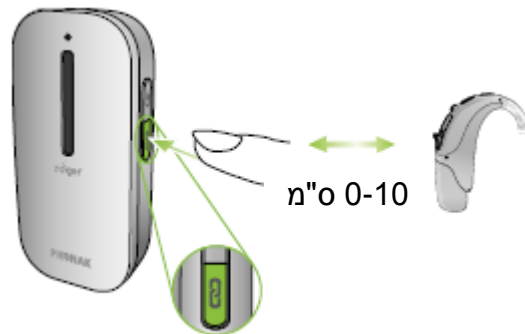
במידה ואתם משתמשים במקלטי Roger אשר מתחברים ישירות למכשירי השמיעה שלכם, ודאו שהמקלטים מחוברים היטב וכן שכל אחד ממכשירי

השמיעה מכוון לתוכנית ה Roger/FM/DAI/EXT/AUX שלו.

3.5 חיבור המקלט

קלינאי התקשורת שלכם אולי כבר חיבר את ה Roger Clip-On Mic למקלט. במידה ולא, חברו את המקלט ל Roger Clip-On Mic בהתאם לשלבים הבאים:

1. ודאו שה Roger Clip-On Mic ומקלט ה Roger אכן הודלקו.
2. החזיקו את ה Roger Clip-On Mic במרחק של 10 ס"מ ממקלט ה Roger.
3. לחצו על לחצן ההתחברות  ב Roger Clip-On Mic.



4. במידה וההתחברות הצליחה- נורית החיווי תדלק בצבע ירוק למשך שתי שניות.
5. על מנת לחבר מקלט נוסף, יש לחזור על שלבים 2-3.

① כתלות בסוג המקלט, ניתן לחבר עד שני מקלטים מסוג Roger למכשירי השמיעה, או לחילופין לחבר Roger MyLink אחד בלבד אל ה Roger Clip-On Mic.

נורית החיווי (מצב ההתחברות)

לאחר לחיצה על לחצן ההתחברות, נורית החיווי עשויה להגיב באחד מהאופנים הבאים:

משמעות	נורית החיווי
ההתחברות הצליחה- מקלט ה Roger שלכם מחובר כעת אל ה Roger Clip-On-Mic.	●
<u>Roger Clip-On-Mic לא הצליח למצוא מקלט Roger.</u> קרבו את משדר ה Clip-On Mic אל עבר מקלט ה Roger וודאו שהמקלט אכן דלוק. לאחר מכן נסו שוב להתחבר.	●●
מקלט ה Roger שלכם איננו תואם את ה Roger Clip-On Mic.	●●●

4. שימוש ב Roger Clip-On Mic

4.1 נשיאה של ה Roger Clip-On Mic

הדרך הקלה ביותר עבור הדובר לשאת את ה Roger Clip-On Mic על גופו היא באמצעות השימוש בקליפס. ישנן מספר דרכים להצמיד עם הקליפס את ה Roger Clip-On Mic לבגדיו של הדובר:



מחובר בקליפס אל הצווארון של החולצה (חברו את הקליפס כלפי מטה)

או



מחובר בקליפס אל הבגדים (חברו את הקליפס כלפי מעלה)

או



מחובר בקליפס בין הכפתורים של הבגד (חברו את הקליפס כשהוא מופנה הצידה)

- ① ודאו שה Roger Clip-On Mic מופנה כלפי פיו של הדובר.
- ② המרחק בין ה Roger Clip-On Mic לפיו של הדובר צריך לעמוד על 20 ס"מ לכל היותר.



עד 20 ס"מ



רחוק מדי



לא מופנה כלפי הפה

4.2 השימוש בלולאה

במידה ולא ניתן לחבר את ה Roger Clip-On Mic אל בגדיו של הדובר, אז ניתן לחילופין לתלות את ה Roger Clip-On Mic באמצעות לולאה סביב צווארו של הדובר.

חיבור הלולאה

1. לחצו על הקליפס של ה Roger Clip-On Mic והחליקו מעליו את החלק הפלסטי של הלולאה.




2. סגרו את הקליפס וודאו שהוא סגור לחלוטין.



על מנת להסיר את הלולאה, פתחו את הקליפס ומשכו החוצה את הלולאה.

1.

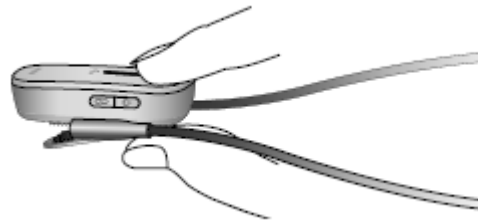

2.



תלייה מסביב לצוואר



1. פתחו את הלולאה באמצעות משיכה של המגנטים הרחק זה מזה.



2. תלו את ה Roger Clip-On Mic סביב צווארו של הדובר וסגרו את הלולאה.



3. כווננו את אורכה של הלולאה כך שה Roger Clip-On Mic ימוקם קרוב אל הפה. קבעו את החוט באמצעות משיכה של הכבל אל תוך המרווח.

4. המרחק בין Roger Clip-On Mic לבין הפה צריך להיות קטן מ-20 ס"מ.

מרחק מקסימלי של 20 ס"מ



4.3 התחברות למכשירי מולטימדיה

ניתן לחבר את ה Roger Clip-On Mic למקור שמע, כדוגמת טלוויזיה, מחשב לוח (טבלט) או HiFi. כך ניתן לשמוע את אותם מכשירים ישירות בתוך מכשירי השמיעה.

דרך תחנת עגינה




ודאו שתחנת העגינה דלוקה ומחוברת היטב למקור השמע, כפי שמתואר בפרק "הנחיות לשימוש במשדר שלב-אחר-שלב" (ע"מ 7). הכניסו את ה Roger Clip-On Mic לתוך החריץ של תחנת העגינה. לאחר הדלקתו של מקור השמע, Roger Clip-On Mic יזהה באופן אוטומטי את נוכחותו של אות השמע ויתחיל לשדר אותו.

- ① במידה ותחנת העגינה איננה דלוקה, ה Roger Clip-On Mic עדיין יזהה וישדר כל אות שמע חיצוני. על מנת שה Roger Clip-On Mic יבצע זאת, פשוט יש להדליק אותו.
- ① בעת שידור של אות שמע, יושתק המיקרופון של ה Roger Clip-On Mic.

דרך כבל מסוג מיקרו-USB

לחלופין, ניתן להשתמש בכבל האודיו הקצר מסוג מיקרו-USB על מנת לחבר את מכשיר המולטימדיה ישירות אל ה Roger Clip-On Mic.

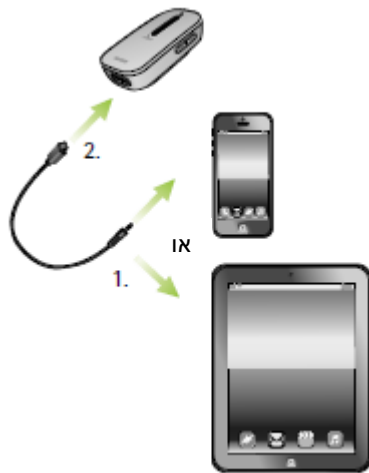

1. חברו את הקצה העגול של כבל האודיו מסוג מיקרו-USB אל תוך פתח האוזניות של מכשיר המולטימדיה.

2. חברו את הקצה המלבני (המיקרו-USB) של כבל המיקרו-USB לתוך השקע של ה Roger Clip-On Mic.

- ① יש להדליק את ה Roger Clip-On Mic על מנת שישדר את אות השמע למכשירי השמיעה. לאחר שהפעלתם את אות השמע של מכשיר המולטימדיה שלכם, Roger Clip-On Mic יזהה את הסיגנל הזה וישתיק באופן אוטומטי את המיקרופון שלו.

5. פונקציות מיוחדות

5.1. השתקה



על מנת להשתיק את המיקרופונים או את כניסת השמע (audio input) של Roger Clip-On Mic, לחצו בחוזקה על לחצן הכיבוי וההדלקה .

כאשר מופעלת השתקה, נורית החיווי תדלק בצבע סגול רציף. לחצו על לחצן הכיבוי וההדלקה בשנית על מנת להפעיל מחדש את המיקרופונים או את כניסת השמע של Roger Clip-On Mic.

נוריות החיווי (השתקה)


נורית החיווי

משמעות

המיקרופון/מקור השמע הושתקו

5.2. ניתוק של מכשירי ה Roger (NewNet)




על מנת לנתק את ה Roger Clip-On Mic מהמקלטים שאליהם הוא מחובר או ממשדרים אחרים מסוג Roger, לחצו על לחצן ההתחברות  במשך 7 שניות. לאחר שה Roger Clip-On Mic התנתק מכל המכשירים אליהם הוא מחובר, נורית החיווי תדלק בצבע כתום.

כעת ניתן לחבר מחדש את מקלטי ה Roger או את המשדרים של Roger אל ה Roger Clip-On Mic שלכם.

5.3. מצב אימות

קלינאי התקשורת או הטכנאי עשוי להשתמש במצב האימות על מנת לאמת שמכשיר מסויים תואם לפרוטוקול מסוג Roger POP (Phonak Offset Protocol).

על מנת להפעיל את מצב האימות, לחצו על לחצן ההתחברות  5 פעמים ברציף.

נוריות החיווי (מצב אימות)

נורית החיווי





משמעות

מצב האימות הופעל

- ① ניתן להפעיל את מצב האימות אך ורק במהלך 60 השניות שמיד לאחר הדלקת ה Roger Clip-On Mic.
- ① כאשר מכבים את ה Roger Clip-On Mic, מצב האימות מנוטרל באופן אוטומטי.

אתחול

במידה וה Roger Clip-On Mic מפסיק להגיב לפקודותיכם, ניתן לאתחל אותו באמצעות לחיצה על לחצן הכיבוי וההדלקה  ולחצן ההתחברות  בו-זמנית למשך 7 שניות.

6. הוספת משדרים


טכנולוגית רוג'ר מאפשרת לכם להשתמש במספר משדרים בו-זמנית באמצעות חיבור של משדרים נוספים מסוג Roger Pen-I Roger Clip-On Mic.


6.1 חיבור

על מנת לחבר משדר נוסף ל Roger Clip-On Mic, יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:

1. הדליקו את שני המשדרים.
2. החליטו מי מבין ה Roger Clip-On Mics יהיה המשדר העיקרי. סמנו את המשדר הזה באמצעות הדבקת מדבקת הכוכב על החלק האחורי של המכשיר.



3. החזיקו את המשדרים קרובים זה לזה (בטווח של 10 ס"מ).
4. לחצו על לחצן ההתחברות  של ה Roger Clip-On Mic עם מדבקת הכוכב.

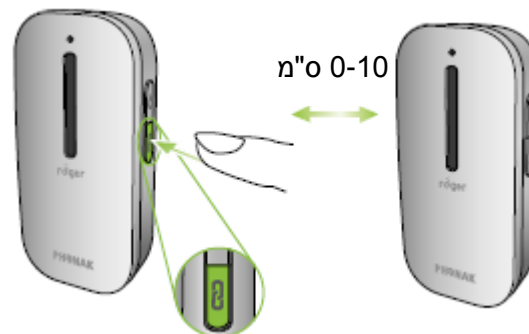

5. במידה והחיבור הצליח, נוריות החיווי של שני המשדרים ישנו את צבען לירוק במשך שתי שניות.

- ① ברגע שחיברתם משדר נוסף אל המשדר המרכזי, ניתן יהיה להשתמש בו אך ורק עם המשדר הראשי. במידה והוא לא מוצא את ה Roger Clip-On Mic הראשי, המשדר השני יבהב בצבע כחול. אם ברצונכם לנתק את המשדר מה Roger Clip-On Mic הראשי שלכם, השתמשו בפונקציית NewNet (ראו "פונקציות מיוחדות").
- ① אם תרצו לחבר את ה Roger Clip-On Mic שלכם עם Roger Pen, מומלץ ללחוץ על לחצן ההתחברות של ה Roger Pen, ולהפוך אותו למשדר הראשי.
- ① ניתן להוסיף עד 10 משדרים מסוג Roger אל ה Roger Clip-On Mic שלכם.

נוריות החיווי (מצב החיבור)


לאחר שתלחצו על לחצן ההתחברות, תקבלו את המשוב הבא:


משמעות	נורית החיווי
ההתחברות הצליחה- משדר ה Roger השני מחובר כעת ל Roger Clip-On Mic שלכם	
Roger Clip-On Mic לא הצליח למצוא משדר Roger אחר. קרבו את ה Roger Clip-On Mic אל משדר ה Roger השני וודאו ששני המשדרים דלוקים. לאחר מכן נסו שוב להתחבר.	
משדר ה Roger איננו תואם ל Roger Clip-On Mic.	

6.2 השימוש במשדרים נוספים

העבירו את המשדרים מסוג Roger אל הדוברים. ודאו כי הם מרכיבים אותם בצורה נכונה (כך שיפנו כלפי הפה ובמרחק של 20 ס"מ ממנו).

המשדרים מסוג Roger Clip-On Mic מזהים באופן אוטומטי כאשר שותפכם לשיחה מדבר, ואז משדרים את קולו באופן מיידי אל מכשירי השמיעה שלכם.

במידה והדובר מעוניין לעזוב את הקבוצה באופן זמני, עליו להשתיק את המשדר שלו באמצעות לחיצה חזקה על לחצן הכיבוי וההדלקה .

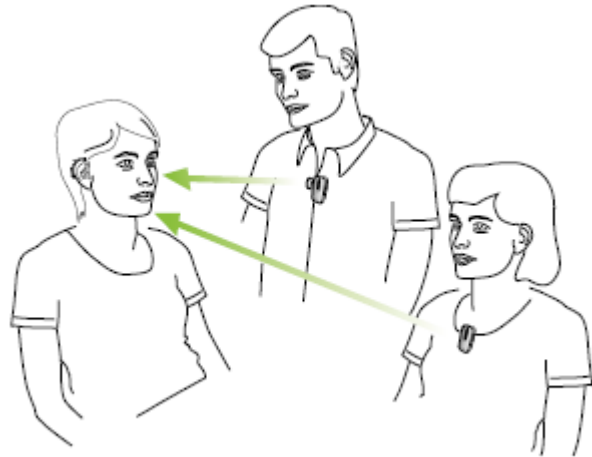

- ① לא ניתן לשמוע יותר מדובר אחד בו-זמנית. כאשר שני אנשים מדברים בו-זמנית, תשמעו את האדם שהחל לדבר ראשון. כאשר הם יפסיקו לדבר, תוכלו לשמוע את הדובר השני.
- ① אין על הדובר שמשמש ב Roger Clip-On Mic הראשי (עם מדבקת הכוכב) להתרחק יותר מ-10 מטרים מהקבוצה. במידה ואתו דובר מעוניין לעזוב זמנית את הקבוצה, עליו להשאיר את המשדר הראשי בתוך הקבוצה.
- ① במידה ומכבים את ה Roger Clip-On Mic הראשי או יוצאים מטווח השידור שלו, המשדרים המשניים מסוג Roger יבהבו בצבע כחול ויפסיקו לשדר.

נוריות חיווי (מצב של ריבוי משדרים)

נורית החיווי	משמעות
	משדר Roger הושתק. ניתן לבטל את ההשתקה באמצעות לחיצה על לחצן הכיבוי וההדלקה ☺.
	משדר Roger אינו מצליח לזהות את משדר ה Roger הראשי. יש להדליק את משדר ה Roger הראשי ולודא כי הוא נמצא במסגרת טווח השידור של משדר Roger. לחלופין, אם אינכם מעוניינים להשתמש ב Roger Clip-On-Mic כחלק מרשת משדרים, לחצו על לחצן החיבור במשך 7 שניות עד שנורית החיווי תשנה את צבעה לכתום. לאחר מכן, עליכם לחבר מחדש את ה Roger Clip-On-Mic למקלטי ה Roger.

7. פתרון בעיות

הפתרון	הגורם הסביר ביותר
לא ניתן להדליק את ה Roger Clip-On Mic	
<ul style="list-style-type: none"> הטעינו את ה Roger Clip-On Mic למשך שעתיים לפחות. 	<ul style="list-style-type: none"> הסוללה ריקה
לא ניתן להבין את הדובר	
<ul style="list-style-type: none"> קרבו את ה Roger Clip-On Mic אל עבר פיו של הדובר. ודאו שה Roger Clip-On Mic מופנה לכיוון פיו של הדובר. 	<ul style="list-style-type: none"> המיקרופון איננו ממוקם בצורה נכונה.
<ul style="list-style-type: none"> ודאו שפתחי המיקרופונים אינם מכוסים על ידי אצבעות, בגדים או לכלוך. 	<ul style="list-style-type: none"> פתחי המיקרופונים מכוסים על ידי אצבעות או בגדים.
אינכם מסוגלים לשמוע את קולו של הדובר אף על פי שהדלקתם את ה Roger Clip-On Mic	
<ul style="list-style-type: none"> בדקו את נורית החיווי- במידה והיא סגולה, לחצו לחיצה קצרה על לחצן הכיבוי וההדלקה על מנת להפעיל את המיקרופונים. ודאו שמכשירי השמיעה מכוונים על התוכנית המתאימה (Roger/FM/DAI/EXT/AUX). החזיקו את ה Roger Clip-On Mic קרוב לכל אחד ממקלטי ה Roger בזה אחר זה, ולחצו על לחצן ההתחברות. בדקו את נורית החיווי- במידה והיא מהבהבת בצבע אדום, הדליקו את המשדר הראשי וודאו שהוא נמצא בתוך טווח השידור. 	<ul style="list-style-type: none"> המיקרופון הושתק. מכשירי השמיעה אינם מכוונים לתוכנית המתאימה. מקלטי ה Roger אינם מחוברים ל Roger Clip-On Mic. במידה והינכם משתמשים במספר משדרים, ייתכן שהמשדר הראשי לא הודלק או שהוא יצא מטווח השידור.
השידור של אות השמע כל הזמן מתנתק	
<ul style="list-style-type: none"> התקרבו אל ה Roger Clip-On Mic. ודאו שאתם מסוגלים לראות את ה Roger Clip-On Mic (שמרו על קו-ראיה). 	<ul style="list-style-type: none"> ה Roger Clip-On Mic רחוק מדי ממקלטי ה Roger. ניצבים מכשולים ביניכם לבין ה Roger Clip-On Mic.
מכשיר המולטימדיה שלכם עובד בעוצמת שמע חלשה מדי	
<ul style="list-style-type: none"> העלו את עוצמת השמע של מקור השמע. 	<ul style="list-style-type: none"> הגדרות העוצמה אינן נכונות.

לא ניתן לשמוע את מכשיר המולטימדיה	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ יש לבטל את ההשתקה של מקור השמע. ▪ יש להדליק את ה Roger Clip-On Mic על מנת להאזין למקור שמע דרך כבל שמע מסוג micro-USB. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ מקור השמע הושתק. ▪ Roger Clip-On Mic משתמש בכבל שמע מסוג micro-USB אך הוא איננו דלוק.
נורית החיווי של Roger Clip-On Mic מהבהבת בצבע כחול	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ יש ליצור NewNet (לחצו על לחצן ההתחברות למשך 7 שניות) על מנת להחזיר את ה Roger Clip-On Mic לעבוד כמשדר בודד. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ המשדר הראשי שאליו מחובר ה Roger Clip-On Mic איננו זמין עוד.
נורית החיווי של Roger Clip-On Mic מהבהבת פעמיים בצבע אדום	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ הטעינו את ה Roger Clip-On Mic מוקדם ככל האפשר. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ סוללה חלשה.
Roger Clip-On Mic הפסיק לעבוד	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ יש לאתחל את ה Roger Clip-On Mic באמצעות לחיצה בו-זמנית על שני הלחצנים. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ בעיית תוכנה.

8. מידע חשוב

8.1 מידע חשוב על בטיחות

אנא קראו את המידע שבעמודים הבאים לפני השימוש במכשיר זה.



הופעתו של סמל זה על המוצר או על האריזה, משמעותה שאין להשליך אותו עם יתר האשפה. באחריותכם להשליך את ציוד הפסולת בנפרד מזרם הפסולת המוניציפלי. השלכה נכונה של מוצרים ישנים תעזור למנוע השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

8.2 אזהרות

- △ יש להרחיק מכשיר זה מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3.
- △ פתיחת המכשיר עשויה להזיק לו. במידה ועולות בעיות שלא ניתן לפתור באמצעות ההנחיות שמופיעות בפרק "פתרון בעיות" שבמדריך זה, אנא היוועצו במכון השמיעה המטפל בכם.
- △ יש לתקן מכשיר זה אך ורק במרכז שירות מורשה. אין לבצע במכשיר זה שינויים או התאמות אשר לא אושרו במפורש על ידי חברת Phonak.

- △ יש להשליך רכיבים אלקטרוניים בהתאם לתקנות המקומיות.
- △ אין להשתמש במכשיר באזורים שבהם חל איסור על השימוש במכשור אלקטרוני. במקרה של ספק, יש לשאול את האחראי במקום.
- △ אין להשתמש במכשיר במטוסים אלא אם כן הדבר אושר מפורשות על ידי צוות-הטיסה.
- △ יש לחבר מכשירים חיצוניים אך ורק אם הם נבדקו בהתאם לתקני ה- IECXXXXX המתאימים.
- △ השתמשו אך ורק באביזרים אשר אושרו על ידי חברת Phonak AG.
- △ השימוש בכבלים של המכשיר בכל דרך אשר איננה תואמת את ייעודם (לדוגמא, ענידה של כבל ה-USB מסביב לצוואר) עשוי לגרום לפגיעה.
- △ בעת הפעלת מכונות, יש לוודא שאף חלק מהמכשיר לא נתפס במכונה.
- △ אין להטעין את המכשיר בעודו על גופכם.
- △ זהירות: סכנת התחשמלות. אין להכניס את התקע לבדו לתוך שקעים חשמליים.

8.3 מידע אזהרה הנוגע למוצר

- ① יש להגן על המכשיר מפני מכות חזקות ורטט.
- ① אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות וללחות מעבר לתנאים המומלצים בהוראות השימוש.
- ① אין להשתמש במיקרוגל או בכל מכשיר חימום אחר על מנת לייבש את המכשיר.
- ① יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית לחה. לעולם אין להשתמש בתכשירי ניקוי ביתיים (אבקת כביסה, סבון וכו') או אלכוהול על מנת לנקות את המכשיר.
- ① יש להטעין את המכשיר אך ורק באמצעות המטענים המסופקים על ידי פונאק או באמצעות מטענים מיוצבים שמספקים 5VDC ו-500mA.
- ① אין לחבר למכשיר כבל USB או כבל אודיו שאורכם עולה על 3 מטרים.
- ① כאשר המכשיר איננו בשימוש, יש לכבות אותו ולאפסן אותו במקום בטוח.
- ① יש להגן על המכשיר מלחות מוגזמת (רחצה, שחייה), חום (רדיאטור, רכב), וכן ממגע ישיר עם העור בעת הזעה (אימון כושר).
- ① קרינת רנטגן, CT או MRI עשויים להרוס או להשפיע לרעה על תפקודו של המכשיר.
- ① אין להשתמש בכוח מוגזם כאשר מחברים את המכשיר לכבלים השונים שלו.
- ① יש להגן על כל הפתחים (מיקרופונים, פתח אודיו ופתח המטען) מפני לכלוך ואבק.

- ① במידה והמכשיר נפל או ניזוק, במידה והוא מתחמם יתר על המידה בעת הטענה, במידה וניזוק אחד הכבלים או התקעים, או במידה והמכשיר הופל לתוך נוזל- הפסיקו להשתמש במכשיר וצרו קשר עם מכון השמיעה.
- ① מכשיר זה מכיל סוללה פנימית נטענת. ניתן להטעין ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא עשויה להישחק. במצב זה, רק גורם מורשה רשאי להחליף את הסוללה.

8.4 מידע חשוב אחר

- מומלץ כי אנשים עם קוצבי-לב או מכשור רפואי אחר יתייעצו עם הרופא המטפל בהם, או עם היצרן של המכשור הרפואי, לפני השימוש ב Roger Clip-On Mic. השימוש ב Roger Clip-On Mic עם קוצב-לב או מכשור רפואי אחר, **תמיד** צריך להיות בתיאום עם המלצות הבטיחות של הרופא המטפל בך או היצרן של המכשור הרפואי.
- המכשיר אוסף ומאחסן מידע טכני פנימי. המידע הזה עשוי להיקרא על ידי קלינאי התקשורת או הטכנאי במטרה לבדוק את המכשיר וכן במטרה לעזור לך להשתמש בו בצורה נכונה.
- האות הדיגיטאלי שנשלח מהמכשיר למקלט המחובר אליו איננו יכול להיקלט על ידי מכשירים אחרים אשר אינם ברשת המשדרים שלו.

9. שירות ואחריות

9.1 אחריות מקומית

אנא שאלו את קלינאי התקשורת במכון שבו רכשתם את המשדר אודות התנאים של האחריות המקומית.

9.2 אחריות בינלאומית

חברת פונאק מספקת אחריות מוגבלת של שנה אחת על ה Roger Clip-On Mic. האחריות תקפה מתאריך הרכישה. האחריות מכסה תיקונים במקרים של פגם בחומרים או בתהליך הייצור. האחריות תקפה במידה ומוצגת הוכחה לרכישת המכשיר.

9.3. מגבלות האחריות

האחריות לא תכסה מקרים בהם המשדר נפגם כתוצאה משימוש או טיפול לא הולמים, חשיפה לכימיקלים, טבילה במים או לחץ לא-סביר. כמו כן, האחריות לא תכסה גם פגם כתוצאה מתיקון או שירות על ידי גורם לא מורשה. אחריות זו איננה מכסה שירותים שניתנים על ידי קלינאי התקשורת במשרדו.

מספר סידורי

תאריך הרכישה:

חותמת של מכון השמיעה
