

## הנחיות חיבור משדר דגם TV Link Base 2 לטלוויזיה

לקוחות יקרים, תודה שרכשתם אביזר להאזנה לטלוויזיה תוצרת חברת Sonova, שווייץ

להלן הנחיות חיבור המשדר לטלוויזיה:

(1) יש לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות:  
\* חיבור באמצעות כבל אופטי:

יש לחבר את הכבל האופטי ליציאה "Optical" בגב הטלוויזיה ואת הצד השני של הכבל למשדר (שקע מספר "6" שבתרשים).

\*\* חיבור באמצעות כבל אנלוגי (3.5 מ"מ):

יש לחבר את הכבל האנלוגי ליציאת האודיו בגב הטלוויזיה באמצעות מתאם (RCA/Scart - יש לרכוש בנפרד) ואת הצד השני של הכבל למשדר (שקע מספר "8" שבתרשים).

(2) יש לחבר את כבל ספק הכוח לשקע מספר 5 במשדר ואת ספק הכוח לשקע החשמל שבקיר



אנו מאחלים לכם צפייה נעימה