

תחילת העבודה ב-remote adjust

הפעלת Insights*

באפשרותך לכוון את מכשירי השמיעה ללא צורך בהגעה למכון ב-3 צעדים פשוטים.

1. הורד את היישומון
Remote Plus
של Unitron.



2. עקוב אחר ההוראות
על גבי המסך כדי
לבצע צימוד למכשירי
השמיעה שלך.



3. הפעל את
Insights לפי
הנחיות היישומון.



*על קלינאי התקשורת לאפשר חיבור ל-Insights בעת פגישה במכון השמיעה. כדי לעשות שימוש ב-remote adjust, עליך להפעיל את Insights ביישומון Remote Plus.

*לשימוש ביישומון Remote Plus נדרשים מכשירי שמיעה של Unitron עם קישוריות Bluetooth®. היישומון Remote Plus מתאים לטלפונים חכמים של Apple עם גרסה iOS® 12 ומעלה ולטלפונים חכמים של Android™ עם גרסה 7 ומעלה. תג App Store הוא סימן מסחרי של Apple Inc., הרשום בארצות הברית ובמדינות אחרות. Google Play והסמל של Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC.

כוונוני מכשירי השמיעה

הטמעת הכונון מרחוק שבוצע על ידי קלינאי התקשורת ב-3 צעדים פשוטים.

1. קבל הודעה אישית מקלינאי התקשורת שלך.



2. לחץ על ההודעה כדי לגשת לכוונון או פתח את היישומון Remote Plus ועבור אל הגדרות מכשירי השמיעה שלי < כונוני מכשיר השמיעה.



3. בחר את הכונון והטמיע את השינויים.



הערה: השינויים החדשים לא מוצאים חן בעיניך? שחזור ההגדרות הקודמות הוא פשוט מאוד.

Unitron הינה חברת פתרונות שמיעה המאמינה שאנשים צריכים להרגיש הכי טוב באשר לחוויית השמיעה הכוללת שלהם, מההתחלה ועד הסוף. המוצרים, הטכנולוגיות, התכניות והשירותים המשוכללים שלנו מציעים רמה של התאמה אישית שלא ניתן לקבל בשום מקום אחר. התכוננו לאהוב את החוויה.