

Roger NeckLoop

מדריך למשתמש



roger

PHONAK
life is on

A Sonova brand



תוכן העניינים

5	1. ברוכים הבאים
6	2. היכרות עם ה-Roger NeckLoop
7	2.1 תאימות
8	2.2 תיאור המכשיר
9	2.3 האבזרים המצורפים
10	2.4 נוריות וסמלי תצוגה
14	3. תחילת העבודה
14	3.1 טעינה
17	3.2 ענידה
18	3.3 חיבור למיקרופון Roger
20	3.4 כוונן עוצמת הקול
21	4. שימוש ב-USB עבור אודיו
23	5. בדיקת הפונקציונליות של המקלט
23	5.1 חיבור אוזניות
25	5.2 כוונן עוצמת קול מרבית
26	6. פתרון בעיות

30	7. מידע אודות תאימות
39	8. מידע והסבר אודות הסמלים
43	9. מידע בטיחותי חשוב
43	9.1 אזהרות מפני סכנות
46	9.2 מידע אודות בטיחות המוצר
47	9.3 מידע חשוב נוסף
48	10. טיפול ותחזוקה
49	11. שירות ואחריות
49	11.1 אחריות מקומית
49	11.2 אחריות בינלאומית
50	11.3 מגבלות האחריות

מדריך זה למשתמש מתאים עבור:

Wireless models	CE mark applied
Roger NeckLoop (02)	2020
Roger NeckLoop (03)	2020



1. ברוכים הבאים

ברכות על הבחירה ב-Roger NeckLoop של Phonak. Roger NeckLoop הוא מקלט Roger™ קל לשימוש, המתאים לכל מכשיר שמיעה או מעבד קול אשר כולל תכנית T-coil (מתוצרת Phonak או כל יצרן אחר). ה-Roger NeckLoop תואם למשדרי Roger מבית Phonak. יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון, כדי להפיק את המרב מן המכשיר שלכם. אם יש לכם שאלות, אנא פנו לקלינאי התקשורת שלכם.

Phonak – life is on
www.phonak.com

2. היכרות עם ה-Roger NeckLoop

פתרון שמיעה שלכם כולל שלושה מרכיבים עיקריים: לולאה צווארית Roger NeckLoop, מכשיר השמיעה/מעבד הקול שלכם וכן מיקרופון Roger.

מיקרופון ה-Roger מעביר את קולו של הדובר באופן אלחוטי אל מכשיר השמיעה/מעבד הקול דרך לולאת Roger NeckLoop. כדי לשמוע את קולו של הדובר בבירור, כל שעליכם לעשות הוא להפעיל את תכנית T-coil במכשיר השמיעה/מעבד הקול שלכם.

2.1 תאימות

מכשיר השמיעה/מעבד הקול שלכם צריך להיות מצויד בתכנית T-coil כדי שתתאפשר קליטה של אותות דיבור מן הלולאה הצווארית Roger NeckLoop. אם אינכם בטוחים שבמכשירי השמיעה שלכם כלולה תכנית T-coil, שאלו את קלינאי התקשורת.


כדי לקלוט את קולו של הדובר נדרש גם מיקרופון Roger תואם.

המאזין


שימוש במכשירי שמיעה
וב- Roger NeckLoop

הדובר


שימוש במיקרופון
Roger

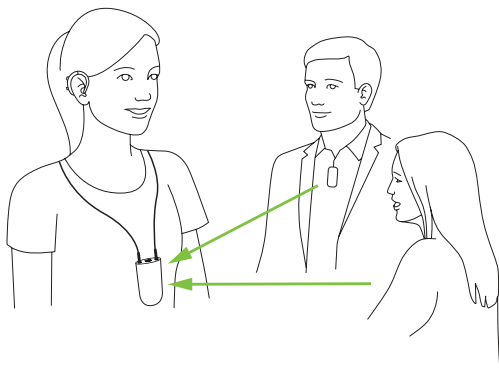


2.2 תיאור המכשיר

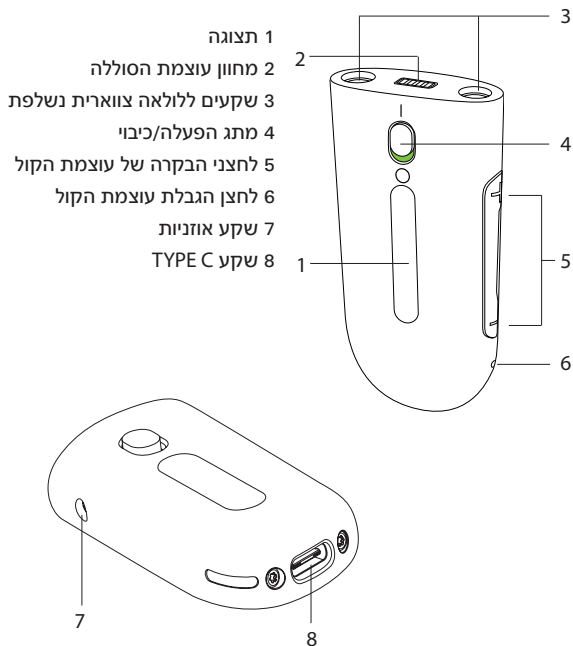


2.3 האבזרים המצורפים

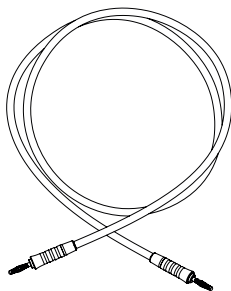

לולאה צווארית אינדוקטיבית

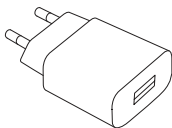

שנאי

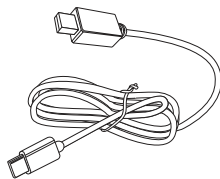

כבל USB

2.4 נוריות וסמלי תצוגה

תפעול

ה-Roger NeckLoop הופעל ומוכן לשימוש.	מחווני התצוגה ומחווני עוצמת הסוללה מוארים למשך מספר שניות.	 
מיקרופון ה-Roger חובר בהצלחה ל-Roger NeckLoop.	סמל החיבור מופיע בתצוגה.	
לא מחובר משדר, או שהמיקרופון כבוי/מחוץ לטווח.	סמל הניתוק מופיע בתצוגה	

עוצמת קול

<p>לחצו על לחצן עוצמת הקול (+/-) כדי לכוון את עוצמת הקול בהדרגה מעלה או מטה.</p>	<p>עוצמת הקול מוצגת מרמת המינימום עד לרמה המרבית (99 מלא).</p>	
<p>לא ניתן להגביר את עוצמת הקול מעבר לקו האופקי.</p>	<p>מגביל עוצמת הקול פעיל.</p>	

יציאת USB

<p>מראה כי ה-Roger NeckLoop מחובר כממשק אודיו להתקן USB.</p>	<p>סמל תו מסמן חיבור למקור חיצוני דרך USB.</p>	
--	--	---

מצב הסוללה

<p>קיבולת הסוללה היא 81-100%.</p>	<p>4 מתוך 4 פסי לד מוארים באור ירוק קבוע.</p>	
<p>קיבולת הסוללה היא 5-20%.</p>	<p>1 מתוך 4 פסי לד באור ירוק קבוע.</p>	
<p>קיבולת הסוללה היא 5%<. יש לטעון את המכשיר.</p>	<p>1 פס לד מהבהב באדום + סמל סוללה מחוק מהבהב בתצוגה.</p>	

טעינה

<p>Roger NeckLoop מחובר למטען ונמצא בהטענה.</p>	<p>הסמל מופיע בתצוגה במשך 3 שניות ולאחר מכן נעלם.</p>	
<p>הסוללה טעונה בשיעור של <20%.</p>	<p>1 פס לד מהבהב בירוק.</p>	
<p>הסוללה טעונה בשיעור של 56-80%.</p>	<p>2 פסי לד בירוק קבוע + 1 בירוק מהבהב</p>	
<p>הסוללה טעונה במלואה.</p>	<p>4 פסי לד בירוק קבוע.</p>	


3. תחילת העבודה

3.1 טעינה

יש לטעון את ה-Roger NeckLoop במלואו לפני השימוש הראשון.

שימוש במטען


1. חברו את הקצה הקטן (TYPE C) של כבל הטעינה ל-Roger NeckLoop.
2. חברו את הקצה הגדול (USB A) של כבל הטעינה לשנאי.
3. חברו את השנאי לשקע חשמל.

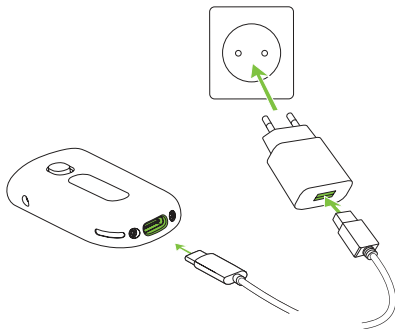

טעינה דרך המחשב

1. חברו את הקצה הקטן (TYPE C) של כבל הטעינה ל-Roger NeckLoop.

2. חברו את הקצה הגדול (USB A) של כבל הטעינה לכניסת ה-USB של המחשב.

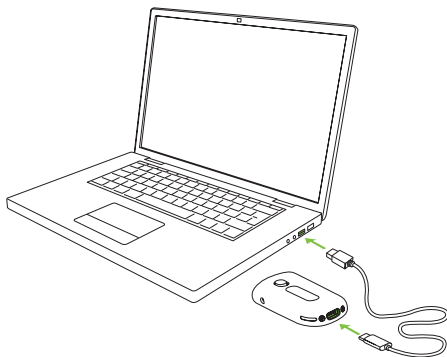


- בעת שימוש במטען המצורף, ה-Roger NeckLoop:
- טעון בשיעור של 80% לאחר שעה אחת
 - טעון בשיעור של 100% לאחר 3 שעות
 - כאשר ה-Roger NeckLoop טעון במלואו, ניתן להשתמש בו במשך 10 שעות או יותר.


3.2 ענידה

1. חברו קצה אחד של לולאת ההשראה הצווארית לשקע שבחלק העליון של ה-Roger NeckLoop.


2. מקמו את הלולאה סביב הצוואר וחברו את הקצה השני של הלולאה לשקע השני.

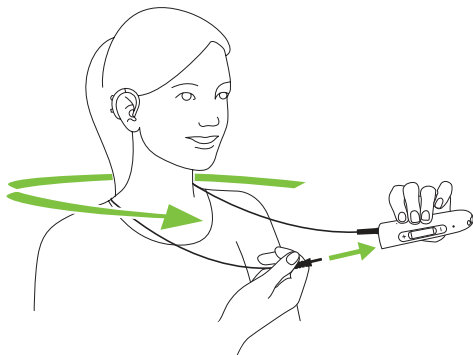

3.3 חיבור למיקרופון Roger

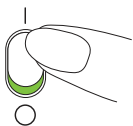

1. הדליקו את מיקרופון ה-Roger.

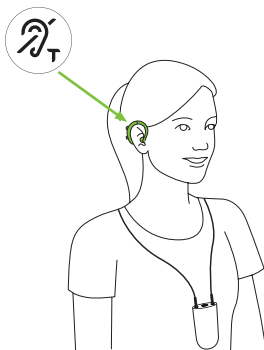


2. העבירו את מכשיר השמיעה/ מעבד הקול שלכם לתכנית T-coil.

① ייתכן שיהיה צורך לפנות לקלינאי התקשורת שלכם לצורך הפעלת תכנית T-coil במכשיר השמיעה/מעבד הקול.

3. החזיקו את ה-Roger NeckLoop בטווח של 10 ס"מ ממיקרופון Roger.


4. לחצו לחיצה קצרה על הלחצן "חיבור" שעל מיקרופון ה-Roger. ראו את המדריך למשתמש עבור מיקרופון Roger.

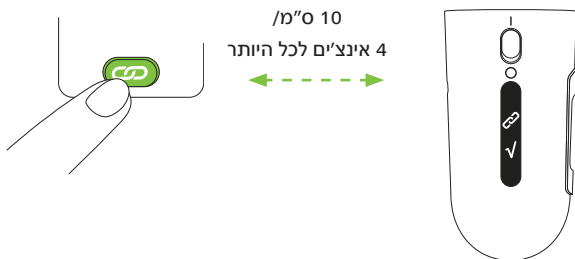

i החיבור נדרש רק בפעם הראשונה שבה נעשה שימוש ב-Roger NeckLoop. שימוש ב-Roger NeckLoop יישאר מחובר למיקרופון גם לאחר אתחולו.

3.4 כוונן עוצמת הקול

השתמשו בלחצני עוצמת הקול לכוונן עוצמת הקול לרמה נוחה.

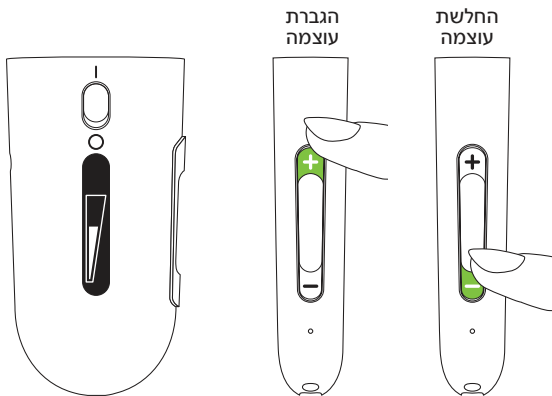

4. שימוש ב-USB עבור אודיו

ניתן לחבר את ה-Roger NeckLoop למחשב תואם או להתקן חכם באמצעות כבל USB, על מנת להאזין ולהקליט אודיו שמועבר דרך מיקרופון Roger.




1. חברו את ה-Roger NeckLoop להתקן חכם או למחשב באמצעות כבל USB. סמל סוללה יופיע בתצוגה למשך 3 שניות.



2. הדליקו את ה-Roger NeckLoop. ב-Roger NeckLoop יוצג סמל של תו.

3. בחרו ב-Roger NeckLoop כהתקן האודיו דרך ההתקן החכם או המחשב.

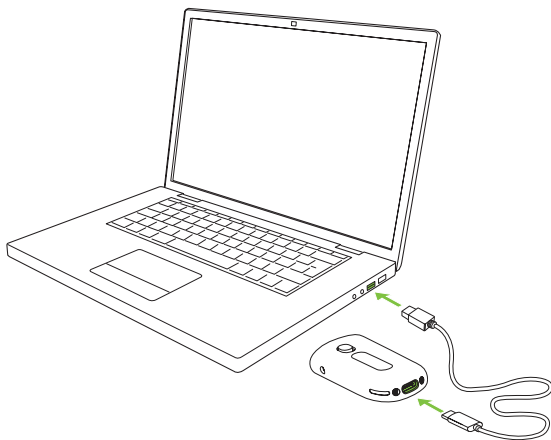


① ראו המדריך למשתמש של ההתקן החכם או המחשב להגדרות נכונות ולמידע אודות תאימות.

5. בדיקת הפונקציונליות של המקלט

(עבור קלינאי תקשורת)

5.1 חיבור אוזניות

ניתן להשתמש באוזניות לצורך ניטור האודיו. כדי ליהנות מנוחות שמיעה מרבית, השתמשו באוזניות הרשמיות של Roger NeckLoop.

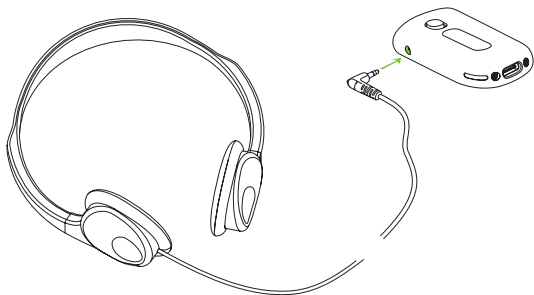

1. חברו את האוזניות לשקע האוזניות.

2. הדליקו את ה-Roger NeckLoop.

3. הרכיבו את האוזניות.


- כאשר האוזניות מחוברות, אות המוצא של לולאת הצוואר נכבה אוטומטית (כדי לחסוך בעוצמת הסוללה).
- עוצמת הקול תתחיל תמיד ברמה בטוחה. השתמשו בבקרת עוצמת הקול כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול (ראו עמוד 20) במקרה הצורך.

5.2 כוונן עוצמת קול מרבית

כדי להבטיח רמת האזנה נוחה עם האוזניות בכל עת, ניתן להגביל את עוצמת הקול המירבית באמצעות הפעלת מגביל עוצמת הקול.

בתוך 30 שניות מן ההפעלה:

1. כונו את עוצמת הקול לפי טעמכם.
2. השתמשו בסיכה כדי ללחוץ על הלחצן של מגביל עוצמת הקול.

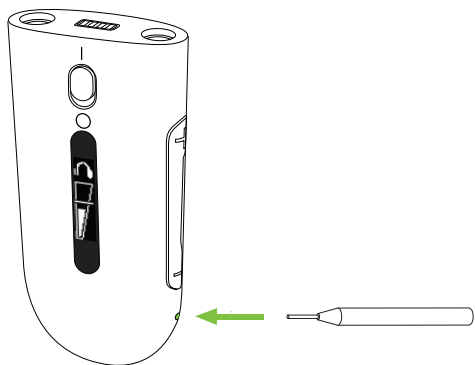

כעת לא ניתן להגביר את עוצמת הקול מעבר לפס האנכי שבתצוגה.

כדי להסיר את המגבלה על עוצמת הקול, חזרו על שלב 2.

6. פתרון בעיות

הגורמים לבעיה	בעיה
הסוללה ריקה.	לא ניתן להדליק את ה-Roger NeckLoop.
אחד ההתקנים או כולם כבויים.	לא ניתן לשמוע קול מתוך מיקרופון Roger.
ה-T-coil שבמכשיר השמיעה אינו מופעל.	
ה-Roger NeckLoop לא מחובר למיקרופון Roger.	
עוצמת הקול חלשה מדי.	
מיקרופון Roger במצב השתקה.	
אחד ממיקרופוני ה-Roger או כולם כבויים.	סמל "חיבור" מחוק נראה בתצוגה.
ה-Roger NeckLoop מחוץ לטווח של מיקרופון Roger.	

פתרונות

טענו את מקלט ה-Roger במשך ארבע שעות לפחות.

ודאו כי כל ההתקנים (Roger NeckLoop, מיקרופון Roger, מכשיר שמיעה) פועלים ובתפקוד מלא.

העבירו את מכשירי השמיעה לתכנית T-coil.

חברו את ה-Roger NeckLoop למיקרופון Roger על ידי לחיצה על „חיבור“ על גבי המיקרופון. לתשומת לב, על ה-Roger NeckLoop להימצא בטווח של 10 ס"מ ממיקרופון ה-Roger.

לחצו על הלחצן „+“ שעל ה-Roger NeckLoop כדי להגביר את עוצמת הקול.

בטלו את ההשתקה של מיקרופון Roger (ראו מדריך למשתמש של המשדר).

ודאו כי כל מיקרופוני ה-Roger דולקים ובמצב פעולה תקין.

התקרבו אל מיקרופון ה-Roger, כדי להימצא בטווח הפעולה שלו.

הגורמים לבעיה

ה-Roger NeckLoop רחוק מדי ממיקרופון Roger.

נגרם סיכון ל-Roger NeckLoop על ידי מכשול כלשהו (לדוגמה, גוף של בן אדם).

הפרעות אלקטרומגנטיות מצויד אחר עלולות לגרום להמהום דרך ה-T-coil של מכשירי השמיעה.

מיקרופון ה-Roger אינו נישא על הגוף בצורה נאותה.

עוצמת הקול לא מוגדרת כראוי.

בעיה

במהלך הזרמת אודיו נגרמת הפרעה לאות.

הקול של ה-Roger NeckLoop באיכות גרועה.

עוצמת הקול חזקה או חלשה מדי.

פתרונות

התקרבו אל מיקרופון ה-Roger, כדי להימצא בטווח הפעולה שלו.

כוונו את מיקום המכשיר וודאו כי אתם בקו ראייה עם מיקרופון Roger.

התרחקו מציוד אלקטרוני אחר עד להפסקת ההמהום.

ודאו כי מיקרופון Roger נישא על הגוף כמתואר במדריך למשתמש.

כוונו את עוצמת הקול עד שתתאים לטעמכם.


7. מידע אודות תאימות

אירופה:

הצהרת תאימות

Sonova AG מצהירה בזאת כי המוצר עומד בדרישות התקנה הנוגעת למכשור רפואי 2017/745, כמו גם בהנחייה בדבר ציוד רדיו 2014/53/EU. ניתן להשיג את הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי דרך היצרן או דרך הנציג המקומי של Phonak, שכתובתו מופיעה ברשימה שבכתובת <https://www.phonak.com/com/en/certificates.html> (מיקומי Phonak ברחבי העולם).


אוסטרליה/ניו זילנד:

מציינת את תאימות המכשיר להסדרים הרגולטוריים הרלוונטיים של Radio Spectrum Management's (RSM) וכן של R-NZ הרשות האוסטרלית לתקשורת ומדיה (ACMA) בנוגע למכירה חוקית בניו זילנד ואוסטרליה.  R-NZ

תווית התאימות R-NZ נוגעת למוצרי רדיו המסופקים בשוק של ניו זילנד תחת רמת התאימות A1.

FCC ID: KWCRX23

IC: 2262A-RX23

 R202-SMI050

בתאימות לתקנה (איחוד אירופי) 2017/1354, ההרשאה
לדרישות השימוש בתדרים במדינות השונות כמתואר
בפיקטוגרמה שלהלן:

	BE	DK	FR	IE	LT	MT	PT	SK	SI
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

הודעה 1:

rvp מכשיר זה תואם לסעיף 15 של כללי ה-FCC 'M' וכן לתקן RSS-210 של Industry Canada. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים:
1) התקן זה אינו יכול לגרום להפרעה, וכן
2) התקן זה יכול לקבל כל הפרעה, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה של ההתקן.



הודעה 2:

אישור ה-FCC להפעלתו של מכשיר זה לא יהיה תקף אם יבוצעו שינויים במכשיר זה ללא אישור מפורש מחברת סונובה.

הודעה 3:

ההתקן נבדק ונמצא תואם למגבלות שנקבעו עבור התקנים דיגיטליים בעלי סיווג Class B, בכפוף לסעיף 15 של כללי ה-FCC ולתקן ICES-003 של Industry Canada. המגבלות הללו תוכננו לספק הגנה סבירה נגד הפרעות מזיקות בהתקנה בסביבת המגורים. ההתקן מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה של תדרי רדיו ואם לא יותקן ומופעל בכפוף להוראות, עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. אולם, אין כל ערובה לכך שההפרעה לא תתקיים בהתקנה ספציפית. אם ההתקן אכן גורם הפרעה מזיקה לקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, כפי שניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה של ההתקן, מומלץ למשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת הפעולות הבאות:

- כוונו או מקמו מחדש את האנטנה הקולטת.
- הגדילו את המרחק המפריד בין המכשיר והמקלט.
- חברו את המכשיר לשקע או למעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- היוועצו במשווק או בטכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך.

הודעה 4:

תאימות לחוק הרדיו היפני. התקן זה מסופק בכפוף לחוק הרדיו היפני (電波法). אין לשנות התקן זה (אחרת המספר הייעודי שהוקצה יהפוך בלתי תקף).



הודעה 5:

הצהרה בדבר חשיפה לקרינה של ה-Industry/FCC Canada. התקן זה תואם למגבלות החשיפה לקרינת RF של ה-FCC, כפי שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. אין למקם את המשדר לצד אנטנה או משדר אחר או להפעילו במשולב עמם.

כל אירוע חמור שמתרחש בהקשר עם אביזר זה מחייב דיווח לנציג היצרן ולרשות המתאימה של המדינה. אירוע חמור מתואר ככל אירוע אשר הוביל, עשוי להוביל או עשוי היה להוביל, בין אם ישירות או בעקיפין, לכל אחד מן הבאים: מוות של מטופל, משתמש או כל אדם אחר, התדרדרות חמורה, בין אם באופן זמני או לצמיתות, במצב הבריאותי של מטופל, משתמש או כל אדם אחר, איום חמור על בריאות הציבור.

כדי לדווח על פעולה או אירוע בלתי צפויים, פנו אל היצרן או אל נציגו.

טיפול יסודי ושגרתי באביזר תורם לביצועים איכותיים ולחיי שירות ארוכים. כדי להבטיח חיי שירות ארוכים, Sonova AG מספקת תקופת שירות מינימלית בת חמש שנים לאחר הפסקת הייצור של המוצר.

למידע נוסף בנוגע לתכונות, תועלת, הגדרה, שימוש ותחזוקה
או תיקונים של האבזרים שברשותכם – פנו אל קלינאי
התקשורת שלכם או אל נציג היצרן. מידע נוסף זמין בגיליון
הנתונים של המוצר שלכם.

למידע הנודע לשירות התיקונים של מכשירי השמיעה, פנו אל
קלינאי התקשורת שלכם.

שימוש מיועד:

מקלטי לולאה צווארית מיועדים לספק גישה למקור קול חיצוני.

התוויה: מקלטי לולאה צווארית אינם מספקים פונקציה תרפויטית או אבחונית. הפונקציה התרפויטית מסופקת אך ורק על ידי מכשיר האם הרפואי (לדוגמה, מכשיר שמיעה או שתל שבלולי), אשר קולט ומעבד את האות האינדוקטיבי שמספקת הלולאה הצווארית לפיכך, ללולאה הצווארית עצמה אין כל התוויה קלינית.

מפרטים טכניים

פרמטרי RF		
2.4 GHz	<9 kHz	פרמטרי
2 mW	120 dBuA/m at 10 m	הספק מוצא מרבי
תאימות לתקני פליטה וחסיונות		
תקני פליטה		
EN 55011:2016 (CISPR11:2016/AMD1:2016) Group 1, Class B	מתח הפרעה ופליטות RF מוקרנות	
תקני חסיונות		
EN 61000-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2008) (רמות בדיקה: ± 15 kV אוויר / ± 8 kV מגע)	פריקות אלקטרוסטטיות	
EN 61000-4-3:2006+A1+A2 (IEC 61000-4-3:2006+A1+ A2) (תדרים: 0.15-80 MHz ; רמות בדיקה: 10 V ; תדרים: 80 - 2700 MHz ; רמות בדיקה: 10 (80%AM ,1kHz ,V/m	שדות אלקטרומגנטיים	
EN 61000-4-3:2006+A1+A2 (IEC 61000-4-3:2006+A1+ A2) (תדרים (MHz): 780 ,745 ,710 ,450 ,385 ; 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450, 5240, 5500, 5785; רמו(ות בדיקה: משתנה עם התדר, אפנון פולסים או FM)	שדות אלקטרומגנטיים - חסיונות בפני שדות סמוכים	

EN 61000-4-4:2012 (IEC 61000-4-4:2012) רמות בדיקה: ± 2 kV פורטי AC, ± 1 kV פורטי (אותות)	נחשולי מתח חשמליים מהירים (Burst)
EN 61000-4-5:2014 (IEC 61000-4-5:2014)	שיאי מתח
EN 61000-4-6:2014 (IEC 61000-4-6:2013) (תדרים: 0.15-80 MHz; רמות בדיקה: 10 V, אפנון (80%AM, 1kHz)	Radio frequency common mode
EN 61000-4-8:2010 (IEC 61000-4-8:2009) (תדרים: 50 Hz או 60 Hz, רמות בדיקה: 30 A/m)	שדות מגנטיים (תדרים תעשייתיים)
EN 61000-4-11:2004 (IEC 61000-4-11:2004) רמות בדיקה: 0% ב-0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315° עבור 10, 20, 5000 אלפיות שניה/70% ב-0° עבור 500 אלפיות שניה, 0% ב-0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315° עבור 0.5, 1, 250/300 מחזורים/70% ב-0° עבור 35/30 מחזורים)	נפילות מתח והפרעות
IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005 (רמות בדיקה: 50 ± 1 Hz וכן 60 ± 1 Hz)	תנודות של תדירות המתח

8. מידע והסבר אודות סמלים

① סמלים שאינם גלויים על המוצר ניתנים לגישה באמצעות לחיצה על לחצן החלשת עוצמת הקול במשך 5 שניות, בעת הפעלה של ה-Roger NeckLoop. ניתן לעבור בין סעיפי המידע שמופיעים בתצוגה באמצעות לחיצה על לחצן החלשת עוצמת הקול.

באמצעות סמל CE, Sonova AG מאשרת כי מוצר זה – לרבות האבזרים – עומד בדרישות של תקנת המכשור הרפואי (איחוד אירופי) 2017/745 וכן בהנחייה בדבר ציוד רדיו 2014/53/EU.



ההתקן הוא מכשיר רפואי.



מציין את יצרן המכשיר הרפואי, כמוגדר בתקנת המכשור הרפואי. MDR 2017/745



מציין את הנציג המורשה בקהילייה האירופית. ה-EC REP הוא גם היבואן לאיחוד האירופי



סמל זה מציינ כי המדריך למשתמש מכיל מידע חשוב וכי יש לקרוא אותו לפני שימוש במוצר.



סמל זה מציינ, כי חשוב שהמשתמש ישים לב להודעות האזהרה הרלוונטיות שמופיעות במדריך למשתמש.



מידע חשוב לטיפול במכשיר ובטיחותו.



טמפרטורה בהובלה ובאחסון:
-20 עד +60 מעלות צלסיוס (-4 עד +140
מעלות פרנהייט)
טמפרטורת פעולה: 0° עד +45° מעלות
צלסיוס (+32° עד +113° מעלות פרנהייט).



יש לשמור את המוצר יבש



לחות במהלך הובלה ואחסון: 90% (ללא עיבוי). לחות פעולה: 95% (ללא-עיבוי).



לחץ אטמוספרי: 500 hPa עד 1060 hPa.



מציין את מספרו הסידורי של היצרן, כך שניתן יהיה לזהות את הדגם של מכשיר רפואי ספציפי.



מציין את תאריך הייצור.



YYYY-MM-DD

האריזה ניתנת למחזור.



סמל זה על המוצר או אריזתו, משמעותו כי אין לסלק את המוצר עם פסולת ביתית רגילה. באחריותכם לסלק את הציווד בנפרד ממערכת הפסולת העירונית. סילוק נכון של המכשיר הישן שלכם יסייע במניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאותם של בני אדם. מוצר זה מכיל סוללה מוטבעת, שאינה ניתנת להחלפה. אל תנסו לפתוח את המוצר או להוציא את הסוללה, שכן הדבר עלול לגרום לפציעה ולהסב נזק למוצר. לצורך הוצאת הסוללה יש לפנות אל מתקן המחזור המקומי.



9. מידע בטיחותי חשוב

יש לקרוא את המידע שמופיע בעמודים הבאים לפני שימוש ב-Phonak Roger NeckLoop.

9.1 אזהרות מפני סכנות

אנשים שבגופם קוצב לב או התקנים רפואיים אחרים צריכים תמיד להיוועץ ברופא שלהם וביצרן ההתקן הרפואי לפני שימוש במקלט הלולאה הצווארית. שימוש במקלט הלולאה הצווארית עם קוצב לב או התקנים רפואיים אחרים צריך להתבצע תמיד בכפוף להמלצות הבטיחות של הרופא האחראי לקוצב הלב או של יצרן קוצב הלב.

מכשיר זה אינו מיועד לילדים שגילם פחות מ-36 חודשים. השימוש במכשיר זה על ידי ילדים וכן על ידי מי שסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית חייב להתבצע תחת השגחה בכל עת, לשם הבטחת בטיחותם. אין להשאיר ילדים ואנשים בעלי ליקוי קוגניטיבי ללא השגחה עם מכשיר זה.

רק עובדים מורשים רשאים לפתוח את המכשיר וזאת בגין סכנת התחשמלות אפשרית. ⚠


ביצוע שינויים שלא אושרו מפורשות על ידי Sonova אינם מותרים במכשיר זה. שינויים מעין אלה עשויים לפגוע בשמיעתכם או במכשיר. ⚠


אין להשתמש במכשיר באזורים נפיצים (מכרות או אזורי תעשייה שבהם סכנת פיצוץ, סביבות עתירות חמצן או אזורים שבהם נעשה שימוש בחומרי הרדמה דליקים). ⚠


אין להשתמש ב-Roger NeckLoop באזורים שבהם אסור שימוש בצידוד אלקטרוני. ⚠


המכשיר שברשותכם מכיל סוללות יון-ליתיום בעלות סיווג וואט שעה > 20 ואט-שעה, אשר נבדקו בכפוף ל-UN 38.3 של „מדריך האו"ם לבדיקות וקריטריונים" ואשר מחייבים שילוח בכפוף לכל הכללים והתקנות הנוגעים להובלה בטוחה של סוללות יון-ליתיום. ⚠


בעת הפעלת מכונות, יש לוודא כי אף חלק של Roger NeckLoop אינו יכול להילכד במכונה. ⚠


שימוש באבזרים, מתמרים וכבלים שונים מאלה 
שמומלצים או מסופקים על ידי היצרן של ציוד זה עלול
לגרום לעמידות מוגברת בפני קרינה אלקטרומגנטית של
הציוד, וכך לגרום לתפקוד לא תקין.

אוזניות אחרות מלבד אלה המסופקות על ידי Phonak 
עלולות לחרוג מעבר לרמות עוצמה הנחשבות מזיקות. כדי
למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין ברמות קול גבוהות
למשך פרקי זמן ארוכים.

כמטען, יש להשתמש אך ורק בציוד העומד בתקני IEC 
62368 ו/או EN60601-1, בעל סיווג מוצא של 5 VDC ושל
500 mA לפחות.

יש להימנע משימוש בציוד זה בסמוך או על-גבי ציוד אחר 
כיוון שיתכן והדבר יוביל לפעולה לא תקינה. אם יש צורך
בשימוש כזה, יש לבחון את פעולת הציוד הזה והציוד
האחר כדי לוודא שהם פועלים באופן תקין.

אין לענוד את לולאת הצוואר Roger כאשר היא נמצאת 
בטעינה.

אין להעביר את המוצר אל מחוץ למבנה ללא תיק הנשיאה. 

⚠ פריטים של ציוד תקשורת היקפי נייד של תדרי רדיו, כמו כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות, צריכים להיות בשימוש בטווח שאינו פחות מ-30 ס"מ (12 אינץ') מכל אחד מחלקי ה-Roger NeckLoop, לרבות כבלים שצוינו על ידי היצרן. אם לא כן, עלולה להיגרם פגיעה בביצועיו של ציוד זה.

9.2 מידע אודות בטיחות המוצר

- ⓘ Roger NeckLoop מתאים לסביבת הטיפול הביתי.
- ⓘ המכשיר מכיל סוללת ליתיום--פולימר נטענת מובנית, שאינה ניתנת להסרה.
- ⓘ יציאת ה-USB של המטען תשמש למטרה המתוארת בלבד.
- ⓘ יש להגן על המכשיר מפני חום (אין להשאיר בקרבת חלון או ברכב). אין להשתמש בתנור מיקרוגל או במכשירי חימום אחרים לצורך ייבוש ההתקן (וזאת בגין סכנת שריפה או פיצוץ). שאלו את קלינאי התקשורת אודות שיטות ייבוש הולמות.

9.3 מידע חשוב נוסף

① ציוד אלקטרוני בעל מתח גבוה, התקנות אלקטרוניות גדולות ומבנים מתכתיים עלולים להשפיע על טווח הפעולה של ה-Roger NeckLoop ולהקטין אותו במידה משמעותית.

① Roger NeckLoop אוסף ומאחסן נתונים טכניים פנימיים. נתונים אלה ניתנים לקריאה על ידי קלינאי תקשורת, לצורך בדיקת המכשיר וכן לצורך מתן סיוע בשימוש נכון במכשיר.

① בעת חיבור ה-Roger NeckLoop לכבלים השונים שלו, אין להשתמש בכוח.

10. טיפול ותחזוקה

ניקוי המכשיר

שימוש במטלית נטולת מוך היא השיטה המועדפת לניקוי. במקרה הצורך, ניתן לנקות את המשטח בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. המטלית צריכה להיות לחה ולא מטפטפת, על מנת למנוע חדירת לחות למכשיר. אין להשתמש בחומרים ממסים או מדללי צבע, שכן הם עלולים לפגום במשטח.

11. שירות ואחריות

11.1 אחריות מקומית

שאלו את קלינאי התקשורת שממנו רכשתם את המכשירים שלכם אודות תנאי האחריות המקומית.

11.2 אחריות בינלאומית

Phonak מספקת אחריות בינלאומית מוגבלת של שנה אחת, התקפה החל בתאריך הרכישה. אחריות מוגבלת זו מכסה פגמי ייצור וחומרים. האחריות תקפה רק בעת הצגת הוכחת רכישה.

האחריות הבינלאומית אינה משפיעה על זכויותיכם המשפטיות, המעוגנות באחריות המקומית, או על התקינה הארצית הרלוונטית, החלה על מכר של טובין צרכניים.

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
11.3 מגבלות האחריות

אחריות זו אינה מכסה נזק שמקורו בטיפול לא נאות, חשיפה לכימיקלים, טבילה במים או הפעלת לחץ לא נאות. במקרים של נזק הנגרם על ידי צד שלישי או שירות לא מורשה, האחריות לא תהא תקפה. אחריות זו אינה חלה על שירותים המבוצעים על ידי קלינאי התקשורת במכון השמיעה.

מספר סידורי: _____

תאריך הרכישה: _____

קלינאי התקשורת המורשה (חותמת/חתימה)



הערות

029-33299-02/V1.10/2020-12/cl © 2020 Sonova AG All rights reserved



יצרן:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland
www.phonak.com



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Germany

sonova
HEAR THE WORLD