

הוראות ניקוי וטיפול

רמקול ActiveVent™

אנו מברכים אתכם על רכישת מכשירי השמיעה שלכם, המצויידיים ברמקולים מסוג ActiveVent. הטיפול במכשירי השמיעה והניקוי שלהם חשובים ביותר.

מדוע ניקיון מכשירי השמיעה הוא חשוב?

1. תהליך הניקוי מבטיח ביצועים טובים יותר ביומיום
2. הניקוי מאריך את חיי המכשירים
3. הניקוי מונע בעיות ותיקונים שיכולים לנבוע מהצטברות שעווה ולחות



A Sonova brand

PHONAK
life is on

כיצד לבצע את הניקוי?

1. מכשיר השמיעה

נגבו את את מכשירי השמיעה בכל יום בעזרת מטלית לכה.

2. כיפת הסיליקון

נגבו את כיפת הסיליקון בכל יום בעזרת מטלית לכה.

3. החלפת פילטר שעווה


ככלל מומלץ להחליף את הפילטר פעם בשבוע. יחד עם זאת, קלינאי התקשורת המטפל בכם ימליץ על תדירות ההחלפה המתאימה לביצועים הטובים ביותר עבורכם. המשיכו לקרוא בעמוד הבא כיצד יש להחליף פילטר.

(a) דיסק מסתובב

(b) פילטר חדש


(c) תא פסולת עבור פילטרים משומשים

(d) מוט המשמש להחלפה

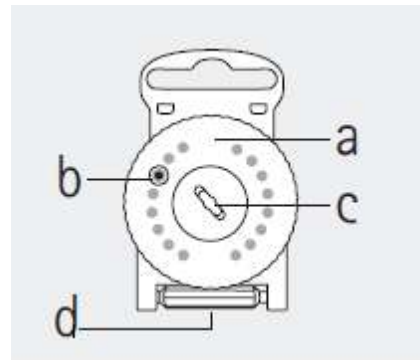


(a) קצה עם הברגה להסרת פילטר משומש

(b) קצה מחורץ להכנסת פילטר חדש

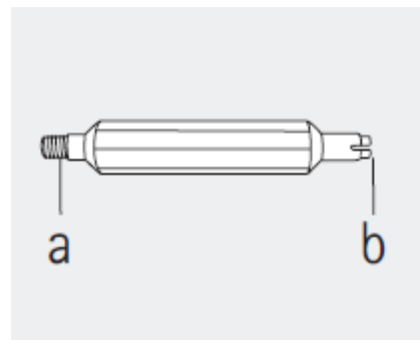


כיצד להחליף פילטר


הסרת הפילטר המשומש

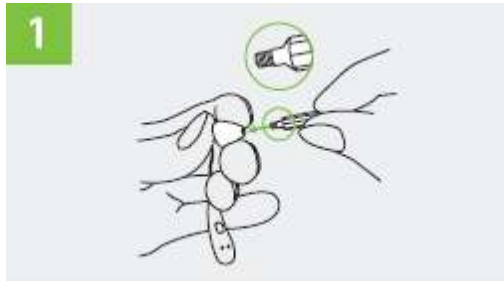

1. החזיקו את כיפת הסיליקון היטב והדקו את החלק האחורי של הרמקול בעזרת האצבע כדי למנוע את התנתקותו מכיפת הסיליקון. הכניסו את קצה ההברגה של מוט ההחלפה לפתח הרמקול, תוך תמיכה ברמקול באמצעות האצבע או האגודל.

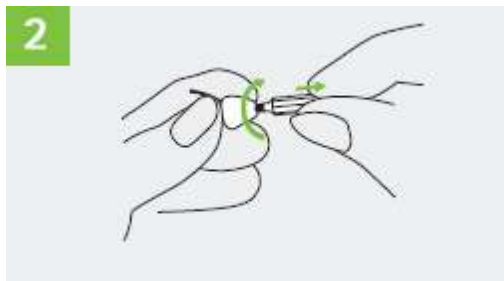


2. סובבו את מוט ההחלפה בכיוון השעון עד שתחושו בהתנגדות מסוימת, ולאחר מכן הסירו את הפילטר המשומש על ידי משיכת מוט ההחלפה מהרמקול.

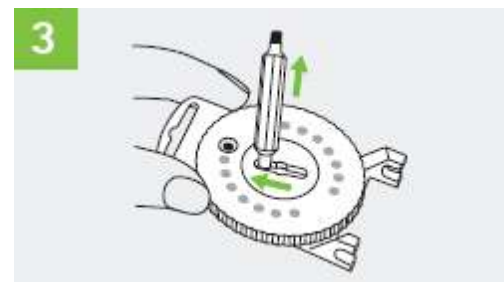


3. הוציאו את הפילטר המשומש על ידי החלקת מוט ההחלפה לאורך החרוץ (תא הפסולת) במרכז המתקן ומשיכת המוט כלפי מעלה.

הכנסת פילטר חדש


1. סובבו את הדיסק של המתקן עד שפילטר חדש מופיע בחלונית.

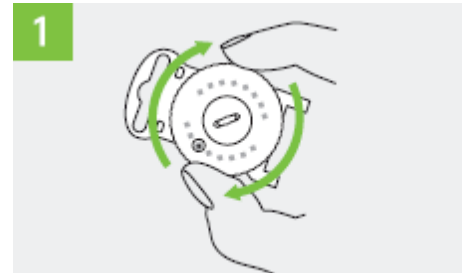


2. הסירו את הפילטר החדש על ידי החדרת הקצה המחורץ של מוט ההחלפה.

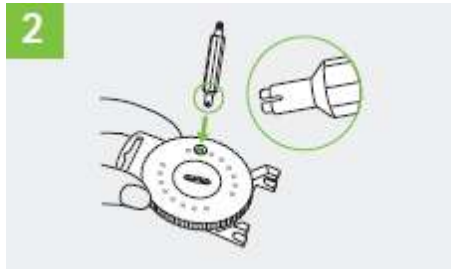

3. החזיקו את כיפת הסיליקון באופן יציב ותמכו בקצה הרמקול, במקום שבו מחוברת הצינורית. הכניסו בעדינות את הפילטר החדש לפתח הרמקול.

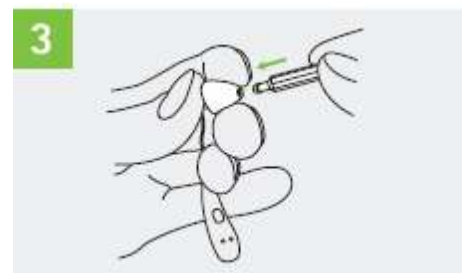

4. א) הטו מעט את מוט ההחלפה תוך כדי משיכתו מהרמקול.
ב) הצמידו את מוט ההחלפה לתא הפסולת של הפילטרים המשומשים.

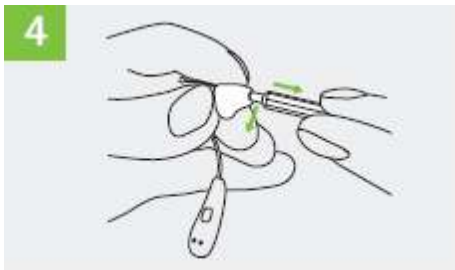

www.phonak.com/activevent

029-1153-02/V1.00/2020-08/Clean and Care ActiveVent Instruction

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברת Sonova AG



sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

EC REP

Sonova Deutschland GmbH · Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Germany